



TOUTES LES RÉPONSES À VOS QUESTIONS SUR La Cup Féminine

Entretien

• Avant chaque utilisation

Stérilisez votre cup en la faisant bouillir pendant 10 minutes.

• Pendant le cycle

Rincez-la à l'eau froide (pour éviter de la tâcher) ou avec du papier.

• En fin de cycle

Conservez votre cup dans sa pochette en coton bio, pas dans une boîte hermétique.



Infos clés


- Peut rester en place jusqu'à 6 heures
- Existe depuis 50 ans
- Souple, donc on ne la sent pas du tout !
- Pas de ficelle qui dépasse
- Durée de vie de 10 ans
- N'assèche pas les parois vaginales
- On peut être vierge et utiliser une cup
- Compatible avec un DIU (stérilet)

Composition

Silicone platine de grade médical : utilisé en chirurgie, il est homologué pour rester 30 jours à l'intérieur du corps humain. Sans latex, sans phtalates ni agents blanchissants, doux et facile à nettoyer.

Positionnement

La cup se place moins loin qu'un tampon :

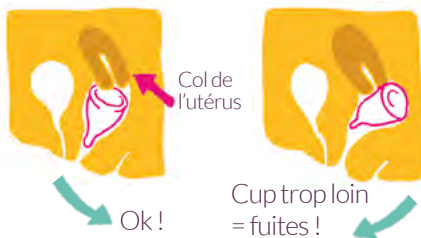

L'insertion et le retrait se font naturellement quand nous sommes détendues ! :)

Insertion

A chacune son pliage préféré !

Pliage en C Enroulée En coquillage



Déploiement et retrait

Une fois la cup insérée, passez le doigt autour pour vous assurer de sa bonne ouverture.

Pour la retirer, attrapez sa tige puis pincez le bas de la cup pour créer un appel d'air. Faites-la glisser doucement.



FAIT EN FRANCE

Des questions ?

Envoyez-nous un mail à
bonjour@lamazuna.com

WWW.LAMAZUNA.COM

Le port de la cup féminine ne protège pas du Syndrome du Choc Toxique (SCT).